



**ALLEGATO 01: PROCEDURA PER IL CORRETTO
UTILIZZO DEL TERMOMETRO AD INFRAROSSI –
Rev.01 del 27/09/2021**

1. RESPONSABILE ATTUAZIONE PROCEDURA

NOMINATIVO	RUOLO/MANSIONE	FIRMA presa visione

2. STRUMENTAZIONE: Termometro a infrarossi per misura frontale di temperatura

3. MISURE PRECAUZIONALI

- 1. Prima di misurare la temperatura con termometro ad infrarossi, adottare la buona prassi di lasciare ambientare il dispositivo nell'ambiente di utilizzo; normalmente sono sufficienti 15 minuti.**
- 2. I termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile che siano conservati lontano da telefoni cellulari e che non siano esposti alle alte temperature, luce diretta del sole, in ambienti con elevata umidità.**
- 3. Il dispositivo deve essere utilizzato solo come stabilito dal manuale di istruzioni. In caso contrario, si possono verificare situazioni di pericolo.**



**ALLEGATO 01: PROCEDURA PER IL CORRETTO
UTILIZZO DEL TERMOMETRO AD INFRAROSSI –
Rev.01 del 27/09/2021**

- 4. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate.**
- 5. Prima dell'uso, verificare che la struttura sia integra e non presenti nessun tipo di danno.**
- 6. Prima di avvicinarsi alla persona a cui misurare la temperatura:**
 - **richiedere alla persona che deve essere controllata di indossare una mascherina anche di tipo chirurgico (ove indossi una mascherina di comunità);**
 - **indossare mascherina chirurgica, guanti ovvero sanificare le mani con gel idroalcolico e, se del caso (es. rilevazione di temperatura a persona sospetta che manifesta sintomi) anche occhiali o schermo protettivo.**
- 7. Nel misurare la temperatura cercare di mantenere la maggiore distanza possibile allungando il braccio: sostenere sempre il dispositivo per l'impugnatura.**
- 8. Non guardare mai direttamente in raggio laser e direzionare esclusivamente alla fronte.**
- 9. La persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario a rilevare la temperatura.**
- 10. Evitare di toccare con il termometro la persona controllata.**
- 11. Pulire il dispositivo con un panno di cotone inumidito e se necessario con un prodotto detergente leggero. Non usare prodotti abrasivi o solventi.**

4. MODALITÀ OPERATIVE

Segue estratto del manuale di istruzione.